

miincare

MASCARILLA HIGIÉNICA, ANTIVÍRICA Y AJUSTABLE
REUTILIZABLE HASTA 100 LAVADOS

meryl[®]
SKINLIFE FORCE 2.0
VIROBLOCK FABRIC

100% poliamida Meryl
ANTIVIRAL VIROBLOCK TECHNOLOGY

Es efectiva contra virus comunes.
Elimina las bacterias y destruye el virus en minutos.
Es una protección efectiva contra la transmisión de virus y bacterias.



ANTIVIRICO



REUTILIZABLE



Tejido de tacto dulce,
sujeción suave, comfortable
y ajustable.



Normativa UNE 0065:2020
Certificado por **Oeko-Tex**
UNE ^{iso}
0065:2020

FILTRACIÓN BACTERIANA

-ANTES DE LAVAR: 92,58%
-DESPUÉS DE 100 LAVADOS: 93,90%

PRESIÓN DIFERENCIAL DE TRANSPIRACIÓN:

-ANTES DE LAVAR: 59PA/CM2
-DESPUÉS DE 100 LAVADOS: 53,87PA/CM2

LABORATORIO LEITAT

NÚMERO DE INFORME: EN-00643/2020-1

ADULTO



NOTA: La mascarilla no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales

ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425".



UNE 0065:2020

miincare

NIF: B63745267

FABRICADO EN ESPAÑA
POR SOURTEX CABRERA S.L.

BLANCO



Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con solución hidroalcohólica.



Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés de cabeza detrás de la misma o a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.
Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
Verificar el sellado y la ausencia de molestias respiratorias.



Lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
Identificar la parte superior de la mascarilla.
Posicionar las mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.



Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.



Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2h posteriores a un horno microondas. Tanto durante el secado, como en el almacenamiento posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar. Las mascarillas utilizadas se pueden deshechar en los contenedores para desechos biológicos.



Realizar un ciclo completo de lavado a una temperatura de lavado de 60°C. La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias. Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia. No se deben usar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.

LAVADO Y SECADO
DE LA MASCARILLA

INSTRUCCIONES DE USO